

# Striate+™ Leták s informacemi pro pacienty

Dostali jste tento leták s informacemi, protože vám váš zubní lékař, ortodontista nebo chirurg doporučil, abyste v rámci léčby defektu zubní kosti podstoupili řízenou regeneraci kosti (GBR).

## Co je řízená regenerace kosti (GBR)?

Zuby jsou v čelisti drženy kostí a dásněmi. Kost, která drží zuby na svém místě, se může z mnoha různých důvodů rozpadnout nebo zeslábnout a je třeba ji opravit. Dásně mohou být také poškozeny infekcí nebo poraněním. Aby vaše zuby zůstaly zdravé a stabilní, používá se řízená regenerace kosti (GBR), která pomáhá léčit kosti nebo dásně.

## Co je Striate+™?

Prostředek Striate+™ je typ náplasti používaný při GBR. Striate+™ vytváří ochrannou vrstvu nad místem ošetření, dokud se netvoří nová kost.

Prostředek Striate+™ je vyroben z kolagenu. Kolagen je běžná látka lidského těla, která se nachází především v kůži, kostech, svalech a šlachách. Prostředek Striate+ je vyroben z prasečího kolagenu, ale byl upraven tak, aby byl bezpečný pro použití u lidí.

Náplast Striate+™ se během zákroku implantuje do dásně a přibližně 6 měsíců po léčbě GBR se zcela rozpustí. Dostali jste kartu s informacemi o implantátu pacienta, kterou si uschovejte pro svou potřebu a která obsahuje číslo šarže, pokud byste chtěli získat další informace o svém implantátu. Kartu s informacemi o implantátu pacienta prosím uschovejte na bezpečném místě, abyste ji mohli v případě potřeby použít. Kartu s informacemi o implantátu pacienta si budete muset ponechat po dobu 1 roku od ukončení léčby. Ošetřující zubní lékař si rovněž vede záznam o čísle šarže vašeho implantátu. Vysvětlení symbolů použitých na kartě s informacemi o implantátu pacienta je uvedeno níže.

## Co mohu očekávat po léčbě?

Váš zubní lékař vám dá pokyny, co máte dělat po ošetření GBR. Cílem je udržet ošetřenou oblast během hojení čistou a nerušenou. Může se jednat o používání ústních vod s léčivými látkami, specifické pokyny, jak a kdy si čistit zuby, nebo vyhýbání se určitým potravinám či nápojům. Je velmi důležité, abyste pečlivě dodržovali pokyny svého zubního lékaře.

## Existují nějaká rizika spojená s použitím prostředku Striate+™?

S používáním náplasti Striate+™ je spojeno jen velmi málo rizik. Prostředek Striate+™ nesmí být použit u osob s alergií na kolagen nebo s alergií na prasečí tkáň. Tyto alergie jsou velmi vzácné, ale pokud máte obavy, můžete požádat svého zubního lékaře o další informace. Náplast Striate+™ lze v případě potřeby odstranit.

## Hrozí při léčbě GBR nějaká rizika?

Stejně jako každá operace má i GBR určitá rizika, jako je infekce, bolest, krvácení nebo otok. Tato rizika obvykle nejsou závažná a váš zubní lékař vám může poskytnout informace o těchto rizicích a o tom, jak se jim vyhnout. Příležitostně se může rána mírně otevřít a náplast Striate+ obnažit. Pokud se tak stane, je třeba, abyste se obrátili na svého zubního lékaře, který vám poradí, co dělat.

Některé zdravotní potíže mohou ovlivnit hojení po GBR, jako např.:

- diabetes, autoimunitní onemocnění;
- užívání warfarinu / léků na ředění krve;
- protizánětlivé léky;
- předchozí radioterapie nebo
- těžké kuřáctví.

# Striate+™ Leták s informacemi pro pacienty

Je známo, že silná závislost na tabáku ovlivňuje normální hojení, a proto vám váš zubní lékař může doporučit, abyste před GBR přestali kouřit nebo snížili množství užívaného tabáku.

Je důležité, abyste před výkonem informovali svého lékaře o všech svých zdravotních potížích a o všech lécích, které užíváte.

Prostředek Striate+™ je bezpečný při vyšetření magnetickou rezonancí (MR), protože se skládá z materiálů, které jsou elektricky nevodivé, nekovové a nemagnetické.

## Kdy vyhledat pomoc

Pokud se u vás objeví jakýkoliv příznak, který vás znepokojuje, neprodleně kontaktujte svého zubního lékaře. Řekne vám, jak nejlépe zvládat příznaky a zda je třeba přijmout další opatření.

Závažnou reakci na prostředek Striate+™ je třeba hlásit distributorovi:

### BioHorizons

2300 Riverchase Center  
Birmingham AL 35244 USA  
[www.biohorizons.com](http://www.biohorizons.com)

## Další kontakty:

Výrobce:

### Orthocell Ltd

Building 191 Murdoch University  
South Street, Murdoch WA 6150  
Austrálie  
e-mail: [info@orthocell.com.au](mailto:info@orthocell.com.au)

Zplnomocněný zástupce v Evropě:

### MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover,  
DE  
e-mail: [info@mdssar.com](mailto:info@mdssar.com)  
Telefon: +49 511 6262 8630

Zplnomocněný zástupce ve  
Švýcarsku:

### MDSS CH GmbH

Laurenzvorstadt 61, 5000 Aarau  
CH  
e-mail: [info@mdssch.com](mailto:info@mdssch.com)  
Telefon: +

Evropský dovozce:

### MedEnvoy Global BV

Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123  
2595 AM, Haag  
NL  
Telefon: +31 70 326 2148

Švýcarský dovozce:

### MedEnvoy

Gottharstrasse 28  
6302, Zug  
CH  
Telefon: +41 41 562 01 42

## Symbyoly použité na kartě s informacemi o implantátu pacienta



Výrobce



Datum implantace



Název prostředku



Zdravotnické zařízení nebo lékař



Kód šarže



Jméno pacienta



Jedinečný identifikátor  
zdravotnického prostředku



Adresa webových stránek výrobce