

Striate+™ Patientinformationsbrochure

Du har modtaget denne informationsbrochure, fordi din tandlæge, ortodontist eller kirurg har anbefalet, at du får styret knogleregeneration (GBR) som en del af din behandling af dentale knogledefekter.

Hvad er styret knogleregeneration (GBR)?

Tænderne holdes på plads i din kæbe af knogle og tandkød. Af mange forskellige årsager kan den knogle, der holder dine tænder på plads, gå i stykker eller blive svag og skal repareres. Tandkødet kan også blive beskadiget af infektion eller læsioner. For at dine tænder kan forblive sunde og robuste, anvendes styret knogleregeneration (GBR) til at hjælpe med at helbrede din knogle eller dit tandkød.

Hvad er Striate+™?

Striate+™ er membran, der anvendes i GBR. Striate+™ danner et beskyttende lag over behandlingsstedet, mens den nye knogle dannes.

Striate+™ er fremstillet af kollagen. Kollagen er et almindeligt forekommende stof hos mennesker, som hovedsageligt findes i hud, knogler, muskler og sener. Striate+™ er fremstillet af kollagen fra svin, men er blevet behandlet, så det er sikkert at bruge på mennesker.

Striate+™ membranen bliver implanteret i dit tandkød under din behandling og vil være helt opløst ca. 6 måneder efter din GBR-behandling. Du har fået et patientimplantatkort, som du skal beholde, og som indeholder lotnummeret, hvis du ønsker flere oplysninger om dit implantat. Opbevar patientimplantatkortet et sikkert sted, så du kan tjekke det, hvis du har brug for det. Du skal beholde patientimplantatkortet i 1 år efter din behandling. Din behandlende tandlæge registrerer også dit implantats lotnummer. Nedenfor forklares de symboler, der anvendes på patientimplantatkortet.

Hvad kan jeg forvente efter min behandling?

Din tandlæge vil give dig oplysninger om, hvad du skal gøre efter din GBR-behandling. Målet er at holde behandlingsområdet rent og uforstyrret, mens det heler. Dette kan indebære brug af en medicinsk mundskyllevæske, specifikke instruktioner om, hvordan og hvornår du skal børste dine tænder, eller at du skal undgå visse føde- eller drikkevarer. Det er meget vigtigt, at du nøje følger din tandlæges instruktioner.

Er der nogen risiko ved at bruge Striate+™?

Der er meget få risici forbundet med brugen af Striate+™-membranerne. Striate+™ bør ikke anvendes til personer med allergi over for kollagen eller allergi over for svin. Disse allergier er meget sjældne, men hvis du er bekymret, kan du bede din tandlæge om mere information. Striate+™-membranen kan om nødvendigt fjernes.

Er der nogen risiko ved at få GBR-behandling?

Som ved enhver anden operation har GBR visse risici, f.eks. infektion, smerte, blødning eller hævelse. Disse risici er normalt ikke alvorlige, og din tandlæge kan give dig oplysninger om disse risici og om, hvordan du kan undgå dem. Såret kan undertiden åbne sig lidt og blotlægge Striate+™-membranen. Hvis dette sker, skal du kontakte din tandlæge for at få oplysninger om, hvad du skal gøre.

Visse medicinske tilstande kan påvirke helingen efter GBR, f.eks.:

- diabetes, autoimmune sygdomme
- brug af warfarin/blodfortyndende medicin
- antiinflammatorisk medicin
- tidligere strålebehandling
- storrygning.

Striate+™ Patientinformationsbrochure

Det er kendt, at storrygning påvirker den normale heling, og din tandlæge kan anbefale, at du holder op med at ryge eller reducerer din rygning, før du får GBR-behandling.

Det er vigtigt, at du fortæller din læge om enhver sygdom, du har, og om alle lægemidler, du tager, før indgrebet foretages.

Striate+™ er MR (magnetisk resonans)-sikkert, da det består af materialer, der er ikke elektrisk ledende, er ikke-metalliske og ikke-magnetiske.

Hvornår skal du søge hjælp

Kontakt straks din tandlæge, hvis du oplever symptomer, som du er bekymret over. Han/hun vil fortælle dig, hvordan du bedst håndterer dine symptomer, og om der skal træffes andre foranstaltninger.

En alvorlig reaktion på Striate+™ skal rapporteres til distributøren:

BioHorizons

2300 Riverchase Center
Birmingham AL 35244 USA
www.biohorizons.com

Andre kontakter:

Fabrikant:

Orthocell Ltd

Building 191 Murdoch University
South Street, Murdoch WA 6150
Australia
Email: info@orthocell.com.au

Autoriseret repræsentant i Europa:

MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover,
DE
Email: info@mdssar.com
Telefon: +49 511 6262 8630

Autoriseret repræsentant i Schweiz:

MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61, 5000 Aarau
CH
Email: info@mdssch.com
Telefon: +

Importør i Europa:

MedEnvoy Global BV

Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123
2595 AM, The Hague
NL
Telefon: +31 70 326 2148

Importør i Schweiz:

MedEnvoy

Gottharstrasse 28
6302, Zug
CH
Telefon: +41 41 562 01 42

Symboler, der anvendes på patientimplantatkortet



Fabrikant



Anordningens navn



Batchkode



Unik udstyrsidentifikation



Implantationsdato



Klinik eller læge



Patientens navn



Fabrikantens webstedsadresse